

 PREFEITURA DE GUARULHOS-SP	SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA SAÚDE	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - GUARULHOS		Proponente: DTE - Assistência Odontológica		
Código AO/ POP 006	Data da Emissão 12-12-2024	Revisão Indeterminada	Revisão 00	Página 1-3

LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO).

POP Nº 006	LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE PEÇAS DE MÃO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO).
---------------	--

1. OBJETIVO

Efetuar a limpeza, lubrificação e preparar a peça de mão para a esterilização.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Ambulatório da Criança e Adolescente, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Prontos Atendimentos (UPA e PA) e Hospitais.

3. RESPONSÁVEL

Cirurgião- Dentista.

4. EXECUTANTE

Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal e Cirurgião- Dentista.

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- EPIs: POP 001;
- Detergente Enzimático;
- Gaze não estéril ou compressa;
- Toalha Específica em Não Tecido Descartável, Toalha de Falso Tecido Descartável ou similar;
- Lubrificante.

6. FREQUÊNCIA

- Sempre que utilizar as peças de mão.

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Utilizar EPIs;
2. Após utilização da peça de mão, sem desacoplar, acionar o pedal por 30 segundos;
3. Desacoplar a peça de mão do terminal;
4. Envolver a cabeça da peça de mão com gaze encharcada com detergente enzimático (conforme recomendação do fabricante) por 5 minutos;
5. Friccionar a gaze encharcada de detergente enzimático por todo corpo da peça de mão por 30 segundos;
6. Remover o detergente enzimático da peça de mão com gaze umedecida em água;
7. Secar a peça de mão com gaze, toalha específica em não tecido descartável ou similar;
8. Lubrificar a peça de mão acionando o spray por 2 segundos;
9. Acoplar a peça de mão no equipo;
10. Envolver a cabeça da peça de mão com gaze ou toalha específica em não tecido descartável e acionar o pedal por 5 a 20 segundos com água fechada para remoção do excesso de lubrificante;
11. Desacoplar a peça de mão, embalar e esterilizar em autoclave.

8. RECOMENDAÇÕES

- Nunca submergir a peça de mão em água, solução desinfetante ou detergente enzimático.
- Evitar dispersão do aerossol utilizando gaze ou similar protegendo a peça de mão.
- Utilizar o bico do aplicador do lubrificante conforme orientação do fabricante.
- Durante a lubrificação segurar a peça de mão na posição horizontal e o lubrificante na posição vertical.
- Caso o resíduo extravasado após lubrificação da peça de mão apresentar resíduos escuros repetir a operação de lubrificação por 2 segundos.
- Excesso de lubrificante interfere no processo de esterilização.
- Envolver a cabeça da peça de mão com gaze antes de embalar para esterilização.
- Antes da utilização da peça de mão, acionar por 30 segundos para eliminar excesso de lubrificação e testar equipamento.

9. REFERÊNCIAS

- Manual do TSB e ASB volume 2 – CROSP;
- Ministério da Saúde - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Manual de Serviços Odontológicos – Prevenção e Controle de Riscos (versão 1.1);
- Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Resolução RDC n.15, de 15 de março de 2012;
- Procedimento Operacional Padrão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais;
- Procedimento Operacional Padrão da Universidade Federal do Ceará.