

 PREFEITURA DE GUARULHOS - SP	SECRETARIA DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - GUARULHOS		Proponente: DAIS - Assistência Odontológica			
Código AO/ POP 010	Data da Emissão 12-12-2024	Validade 24 meses	Revisão 00	Página 1-3	

DESINFECÇÃO DA CAIXA DE PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO

POP Nº 010	DESINFECÇÃO DA CAIXA DE PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO
---------------	--

1. OBJETIVO

Eliminar detritos orgânicos e/ ou inorgânicos para prevenção e controle de doenças. transmissão de infecção ao paciente.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

Nos Consultórios Odontológicos de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Prontos Atendimentos (UPA e PA) e Hospitais.

3. RESPONSÁVEL

Cirurgião- Dentista.

4. EXECUTANTE

Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal e Cirurgião- Dentista.

5. FREQUÊNCIA

Antes do início do uso e ao final do período de uso da caixa de revelação radiográfica odontológica.

6. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- EPIs
- Solução de álcool a 70%
- Sabão líquido
- Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1. Utilizar EPIs;
2. Higienizar as mãos;
3. Remover qualquer resíduo de película radiográfica e descartar conforme POP referente ao descarte de resíduos radiográficos sólidos;
4. Remover os frascos de revelador, fixador e água do interior da caixa e descartar os líquidos (revelador e fixador) conforme POP referente ao descarte de resíduos radiográficos líquidos;
5. Friccionar as superfícies da caixa de revelação com Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar com sabão líquido;
6. Enxaguar com Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar umedecido com água, para remoção de sujidades e resíduos do sabão líquido;
7. Secar toda a superfície com Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar;
8. Friccionar as superfícies da caixa de revelação com Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar embebido em álcool a 70%;
9. Lavar todos os frascos com água e sabão líquido neutro e secar com Toalha de Falso Tecido Descartável (TNT) ou similar;
10. Remover as luvas e descartá-las no lixo apropriado;
11. Higienizar as mãos.

8. REFERÊNCIAS

- https://saude.campinas.sp.gov.br/programas/bucal/Manual_POP_Saude_Bucal.pdf
- <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrrn/documentos-institucionais/pop-ups-029.pdf>
- <http://www.telemacoborba.pr.gov.br/images/pdfs/SMS/ODONTOLOGIA.pdf>
- https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html